

Silflex®

Sårkontaktlager av mjukt silikon

Produktbeskrivning

Silflex® är ett sårkontaktlager förband, icke vidhäftande, gjort av polyesterväv, täckt med Silflex® mjuka silikon. Silflex® är designat för att försiktigt fästa på omgivande hud och skona själva sårbädden. Detta är ett atraumatiskt förband som minimerar smärta i samband med förbandsbyte. Silflex® har hål som medger genomsläpplighet av exsudat till täckförbandet. Silflex® har silikon på båda sidorna.



Bruksanvisning

Ta bort filmen på båda sidorna av förbandet och lägg förbandet direkt på såret. Det gör inget om förbandet är större än sårytan och ligger på frisk hud. Täck med lämpligt sekundärförband, beroende på exsudatmängd. Vi rekommenderar Eclipse Adherent®.

Användningsområde

Alla sår där man vill undvika att förbandet fastnar t ex:

- Smärtande sår
- Skrapår
- Brännsår
- Känslig hud
- Ben- och trycksår
- Barn
- Postoperativt
- Hudflikar



Fördelar

- Skyddar sårbädden
- Fäster endast på torr hud
- Minskad smärta vid förbandsbyte
- Fuktig sår läkningsmiljö



Orderinformation

Artnr	Beskrivning	Storlek	Avd.förp
CR3922	Silflex®	5x7cm	10st
CR3923	Silflex®	8x10cm	10st
CR3924	Silflex®	12x15cm	10st
CR3925	Silflex®	20x30cm	10st
CR4006	Silflex®	35x60cm	5st

STERILE EO   0120

Distributör: SYLAK AB | Ekonomivägen 5, 436 66 Askim | 031-748 49 50 | order@sylak.se | www.sylak.se

Tillverkare: Advancis | Lowmoore Business Park, England | +44162 375 15 00 | www.advancis.co.uk