



# Activon Tulle®

Kompress med Manukahonung

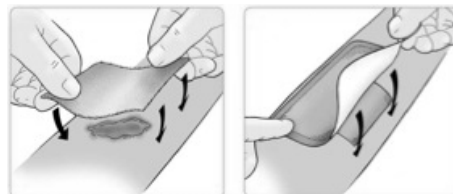

## Produktinformation

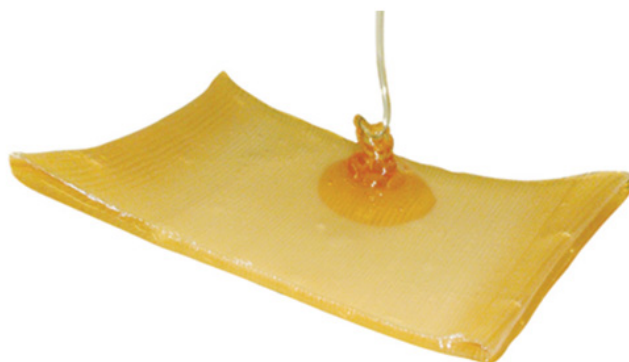

Activon Tulle är en viskoskompress mättad med 100% Manukahonung. Activon Tulle skapar en fuktig sårhelingsmiljö, tar bort odör samt har en antiseptisk effekt. Lämpligt för ytliga eller granulerande sår samt för debridering eller upprepning av nekrotisk eller oren vävnad.

### Bruksanvisning

Öppna förpackningen. Ta ut kompressen och placera förbandet över såret. Täck med lämpligt sekundärförband beroende på exsudatmängd t.ex. Eclipse. Vid kraftigt infekterade sår kan Activon Tulle kombineras med extra Manukahonung med Activon Tube Sårsalva.

### Användningsområden

- Bensår
- Trycksår
- Illaluktande sår
- Maligna tumörsår
- Torra, orena eller nekrotiska sår

### Fördelar

- Antiseptiskt
- Antiinflammatoriskt
- Minskar odör
- Osmotisk effekt
- Bibehåller en fuktig sårhelingsmiljö
- Fastnar inte i såret



## Orderinformation

Artnr	Beskrivning	Storlek	Avd förp
CR3761	Activon Tulle	5x5cm	5st
CR3658	Activon Tulle	10x10cm	5st
CR3830	Activon Tube	25gram	12st