


Algivon & Algivon Plus®

Alginförband med Manukahonung



Produktinformation

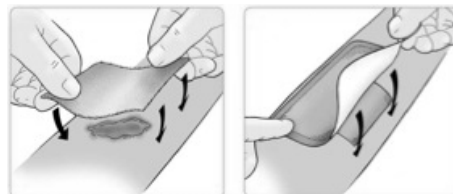

Algivon är ett CA⁺ alginförband impregnerat med 100% Manukahonung. Alginfibrerna möjliggör en förlängd effekt och långsammare utsöndring av honungen. Algivon och Algivon Plus är utmärkt för vätskande sår då alginatet har en förmåga att absorbera utan att honungen sköljs bort. Förbandet är mjukt och följsamt, utmärkt för kaviteter samt debridering och upprensning av nekrotiska och orena sår.

Bruksanvisning

Öppna förpackningen. Ta ut kompressen och placera förbandet över såret. Täck med lämpligt sekundärförband beroende på exsudatmängd t.ex. Eclypse. Vid kraftigt infekterade sår kan Algivon och Algivon Plus kombineras med extra Manukahonung med Activon Tube Sår salva.

Användningsområden

- Bensår
- Trycksår
- Illaluktande sår
- Maligna tumörsår
- Torra, orena eller nekrotiska sår

Fördelar

- Antiseptiskt
- Antiinflammatoriskt
- Minskar odör
- Osmotisk effekt
- Bibehåller en fuktig sår läkningsmiljö
- Fastnar inte i såret





Orderinformation

Artnr	Beskrivning	Storlek	Avd förp
CR3831	Algivon	5x5cm	5st
CR3659	Algivon	10x10cm	5st
CR4230	Algivon Plus	5x5cm	5st
CR4225	Algivon Plus	10x10cm	5st

Algivon Plus Ribbon®

Alginatförband med Manukahonung

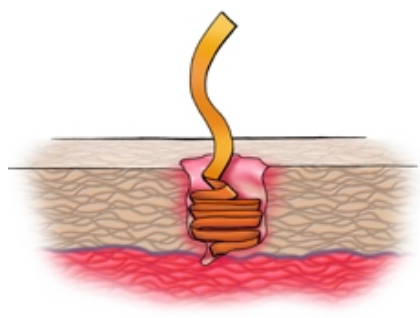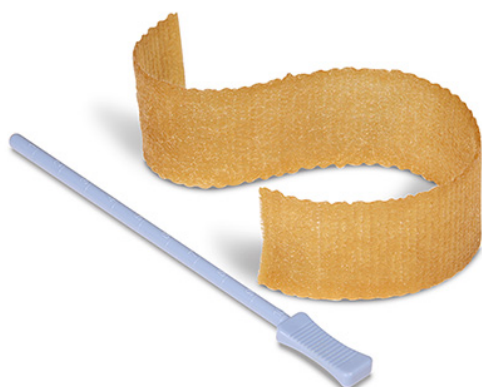

Produktinformation



Algivon Plus Ribbon är ett CA⁺ alginatförband impregnerat med 100% Manukahonung. Alginatfibrerna möjliggör en förlängd effekt och långsammare utsöndring av honungen. Algivon Plus Ribbon är utmärkt för vätskande sår då alginatet har en förmåga att absorbera utan att honungen sköljs bort. Förbandet är mjukt och följsamt, utmärkt för kaviteter samt debridering och upprensning av nekrotiska och orena sår.

Bruksanvisning

Öppna förpackningen. Ta ut kompressen och placera förbandet över såret. Täck med lämpligt sekundärförband beroende på exsudatmängd t.ex. Eclipse. Vid kraftigt infekterade sår kan Algivon Plus Ribbon kombineras med extra Manukahonung med Activon Tube Sårsalva.

Användningsområden

- Bensår
- Trycksår
- Illaluktande sår
- Maligna tumörsår
- Torra, orena eller nekrotiska sår

Fördelar

- Antiseptiskt
- Antiinflammatoriskt
- Minskar odör
- Osmotisk effekt
- Bibehåller en fuktig sårålmiljö
- Fastnar inte i såret



Orderinformation

Artnr	Beskrivning	Storlek	Avd förp
CR4231	Algivon Plus Ribbon	2,5x20cm	5st
CR4223	Wound Probe, Pinne	10cm	10st
CR4236	Wound Probe, Pinne	10cm	50st