

Eclipse Border®

Högabsorberande förband med kontaktlager av silikon samt förstärkt borderkant

Produktbeskrivning

Ett högabsorberande förband för rikligt vätskande sår i kombination med Silfix mjuka silikon teknologi. Silikonets naturliga egenskaper gör att det inte fäster i såret utan enbart på torr hud. Borderkanten är förstärkt med hypoallergisk häftmassa för att optimera att förbandet skall sitta säkert.

Förutom Silfix-lagret finns ett snabb absorberande material och Xu-lock system som binder kvar vätskan i förbandet. Vätskebarriär är det beige/bruna polyetylenlagret som andas och skapar en skyddande barriär mot bakterier och andra mikroorganismer.

Bruksanvisning

Förbandet läggs på, med silikonytan mot såret med minst 2cm överlappning, på frisk hud. Klipp inte i förbandet. Förbandsbyte, dagligen till en gång per vecka, beroende på exsudatmängd.


Användningsområde

För alla rikligt vätskande sår, t ex:

- Bensår
- Trycksår
- Infekterade sår
- Kirurgiska sår
- Brännsår

Fördelar

- Snabb absorption
- Hög vätskehanteringskapacitet, högt MVTR 2800g/m²/24timmar
- Binder vätskan kvar i förbandet
- Vätsketätt ytterskikt som andas
- Atraumatisk fästyta av silikon
- Fuktig sår läkningsmiljö

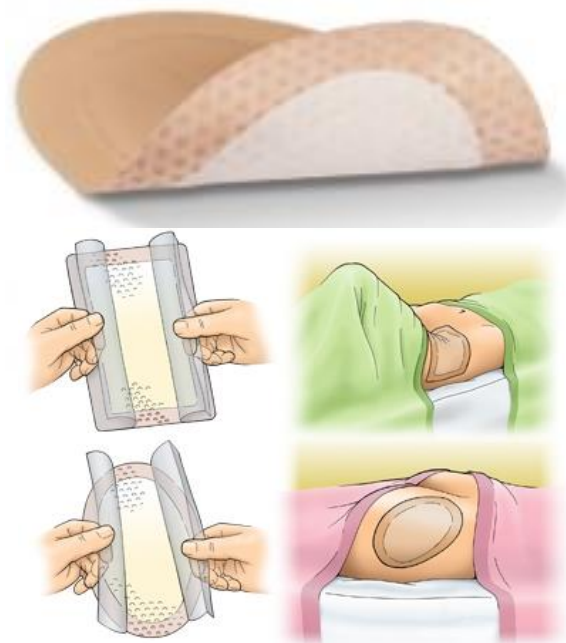

Kontraindikation

Arteriella eller kraftigt blödande sår

Orderinformation

Artnr	Beskrivning	Storlek	Avd.förp
CR4296	Eclipse Border®	15X15cm	10st
CR4297	Eclipse Border®	20x30cm	10st
CR4300	Eclipse Border Oval®	10x20cm	10st
CR4299	Eclipse Border Oval®	15x20cm	10st
CR4298	Eclipse Border Oval®	20x30cm	10st



SYLAK AB

Ekonomivägen 5

436 66 Askim

Tel: 031-748 49 50, Fax: 031-68 39 51

www.sylak.se