

Eclipse[®]

Högabsorberande förband



**Effektiv exsudathantering ...
absorberar vätska, inte din budget**


Eclipse®

Högabsorberande förband

Produktbeskrivning

Ett högabsorberande förband för rikligt vätskande sår. Förbandet är designat för att kunna hantera mycket stora vätskemängder vilket medför att macerationsrisken minskar på frisk hud.

Eclipse® består av ett snabbt absorberande material och Xu-lock systemet som binder kvar vätskan i förbandet. Förbandet är sträcktåligt och håller kvar vätskan väl även när det är maximalt fyllt. Vätskebarriären är den beige/bruna polyetylenlagret som andas och skapar en bakterieskyddande barriär.

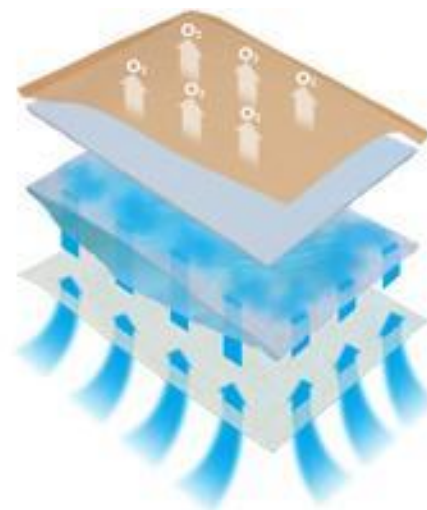

Bruksanvisning

Förbandet läggs på med den vita ytan mot såret med minst 2 cm överlappning på frisk hud. Klipp ej i förbandet. Vid stora sår kan flera förband läggas bredvid varandra. Förbandsbyte skall ske, beroende på exsudatmängd, dagligen till en gång i veckan.

Användningsområde

Alla rikligt vätskande sår, t ex:

- Bensår
- Trycksår
- Infekterade sår



Fördelar

- Snabb absorption
- Hög vätskehanteringskapacitet, högt MVTR 2800g/m²/24timmar
- Binder vätskan kvar i förbandet
- Vätsketätt ytterskikt som andas
- Fuktig sårläkningsmiljö

Orderinformation

Artnr	Beskrivning	Storlek	Avd.förp
CR3818	Eclipse®	10x10cm	20st
CR3769	Eclipse®	15x15cm	20st
CR3743	Eclipse®	20x30cm	20st
CR3808	Eclipse®	60x40cm	10st

