

Eclipse® Boot

Högabsorberande underbensförband

Produktbeskrivning

Eclipse® Boot (stövel) är ett högabsorberande förband, designat för att täcka behovet av ett mycket högabsorberande lätt applicerat underbensförband. I förbandet kombineras ett snabbt absorberande material Xu-lock systemet som binder kvar vätskan i förbandet. Det beige/bruna ytskiktet andas och skapar en skyddande barriär mot bakterier.



Bruksanvisning

Veckla ut förbandet helt. Placera den vita sidan med den lilla triangeln mot hälen, spetsen upp mot patienten. Vik förbandet över foten och fäst med tejp. Vik därefter de större flikarna över underbenet och fäst även dessa med tejp. Eclipse® Boot kan användas under kompressionsförband. Förbandsbyte, dagligen till en gång per vecka beroende på exsudatmängd.

Användningsområde

Vätskande sår, t ex:

- Bensår
- Trycksår
- Arteriella sår
- Diabetessår
- Lymfödem



Fördelar

- Snabb absorption
- Hög vätskehanteringskapacitet, högt MVTR 2800g/m²/24timmar
- Binder vätskan kvar i förbandet
- Vätsketätt ytterskikt som andas
- Sträcktålig
- Tunn och smidig

Orderinformation

Artnr	Beskrivning	Storlek	Avd.förp
CR4294	Eclipse® Boot, medium	60x70cm	5st
CR4237	Eclipse® Boot, small	55x47cm	5st

