

Eclipse® Adherent Sacral

Högabsorberande förband med kontaktlager av silikon



Produktinformation

Advancis
Medical

Ett sakralförband som består av Silfix mjuka silikon som fäster enbart på torr hud, ett snabbabsorberande lager, superabsorbent som binder vätskan till sig (Xu-lock) och ett ytskikt som andas.

Eclipse® Adherent Sacral har en mycket hög förmåga att absorbera vätska samt en unik teknologi, Xu-lock för att binda vätskan. Xu-lock binder vätskan som en gel för att minska risken för uppluckrande sårkanter.

Bruksanvisning

Förbandet läggs på med silikonytan mot såret med minst 2 cm överlappning på frisk hud. Vik förbandet på mitten, lyft skyddsfilmen och lägg in förbandet i sacrumklykan, dra av resten av skyddsfilmen och tryck till förbandet. Klipp inte i förbandet. Förbandsbyte, dagligen till en gång per vecka, beroende på exsudatmängd.

Användningsområde

För alla vätskande sår i sakralregionen

Fördelar

- Snabb absorption
- Hög vätskehanteringskapacitet, högt MVTR 2800g/m²/24timmar
- Binder vätskan kvar i förbandet
- Vätsketätt ytterskikt som andas
- Atraumatisk fästyta av silikon
- Fuktig sårläkningsmiljö



Orderinformation

Artnr	Beskrivning	Storlek	Förp
CR3985	Eclipse® Adherent Sacral	17x19cm	10st
CR3986	Eclipse® Adherent Sacral	22x23cm	10st

