

# Eclipse®

Högabsorberande förband för effektiv vätskehantering



## Produktinformation



Ett högabsorberande förband för rikligt vätskande sår. Förbandet är designat för att kunna hantera mycket stora vätskemängder vilket medför att macerationsrisken minskar på frisk hud.

Eclipse® består av ett snabbt absorberande material och Xu-lock systemet som binder kvar vätskan i förbandet. Förbandet är sträcktåligt och håller kvar vätskan väl även när det är maximalt fyllt. Vätskebarriären är den beige/bruna polyetylenlagret som andas och skapar en bakterieskyddande barriär.

## Bruksanvisning

Förbandet läggs på med den vita ytan mot såret med minst 2 cm överlappning på frisk hud. Klipp ej i förbandet. Vid stora sår kan flera förband läggas bredvid varandra. Förbandsbyte skall ske, beroende på exsudatmängd, dagligen till en gång i veckan.

## Användningsområde

Alla rikligt vätskande sår, t ex:

- Bensår
- Trycksår
- Infekterade sår




## Fördelar

- Snabb absorption
- Hög vätskehanteringskapacitet, högt MVTR 2800g/m<sup>2</sup>/24timmar
- Binder vätskan kvar i förbandet
- Vätsketätt ytterskikt som andas
- Fuktig sårhämningsmiljö

## Orderinformation

Artnr	Beskrivning	Storlek	Förp
CR3818	Eclipse® - högabsorberande förband	10x10cm	20st
CR3769	Eclipse® - högabsorberande förband	15x15cm	20st
CR4460	Eclipse® - högabsorberande förband	10x20cm	10st
CR4439	Eclipse® - högabsorberande förband	20x20cm	10st
CR3743	Eclipse® - högabsorberande förband	20x30cm	20st
CR3808	Eclipse® - högabsorberande förband	60x40cm	10st

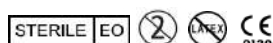

Distributör: SYLAK AB | Ekonomivägen 5, 436 66 Askim | 031-748 49 50 | order@sylak.se | www.sylak.se  
Tillverkare: Advancis | Lowmoore Business Park, England | +44162 375 15 00 | www.advancis.co.uk