

Silent Knight[®]

Tablettkrossare



Många patienter har svårt att svälja tabletter såväl inom slutenvård som hemsjukvård. Med SILENT KNIGHT[®] får man lätt och säker hantering när tabletter måste krossas. Genom att använda SILENT KNIGHT[®] påsarna lägger man i den tablett som ska krossas och med ett par tryck så har tablettens krossats.

Produktinformation

- **Tyst och snabb tablettkrossare**
- **Ergonomiskt handtag som passar alla handstorlekar**
- **Effektiv och kraftfull - krossar tabletter på några sekunder**
- **Minimal risk för korskontaminering av läkemedel tack vare SILENT KNIGHT[®] påsarna**
- **Maximalt resultat med minimal ansträngning**

CE

Orderinformation

Artnr	Beskrivning	Förp
SK-0500-LMP	SILENT KNIGHT [®] tablettkrossare	1st
PC-1000	SILENT KNIGHT [®] påsar	1000st

Silent Knight[®]

Tablettkrossare

Bruksanvisning



Lägg de tabletter som ska krossas i påsarna som finns i facket på SILENT KNIGHT. För handtaget uppåt/framåt och lägg påsen i öppningen.



Tryck handtaget ner/bakåt så krossas tabletten/tabletterna. Gör detta moment 1-3 ggr så att tabletterna krossas.



Avsluta med att göra som på bild 1 för handtaget uppåt/framåt och resultatet blir nu krossade tabletter i en påse. Man kan nu lätt fylla i vatten i påsen om man vill ge det i en sond.