

BladeCASSETTE

BladeCASSETTE för tre blad



Produktinformation

- Steril
- Kombination - säker knivbladsavdragning - säker förvaring
- Transparent - säker knivbladsräkning
- Enhandsfattning tills knivbladet är säkrat
- Minimerar risken för skär- och sticksador
- Passar alla blad till skaft 3, 4, 5, 7 och 9
- Avfallshantering som stickande/skärande riskavfall

Användarinstruktion

- Tryck på det räfflade området mitt på BladeCASSETTE. Då öppnas stödet/skyddet.
- Vik stödet/skyddet bakåt. Tryck till så att BladeCASSETTE står stadigt.
Notera de små "hullingarna" som gör att BladeCASSETTE greppar säkert på underlaget.
- För in skalpellen med en hand i behållaren enligt skissen på BladeCASSETTE.
- Placera BladeCASSETTE upprätt. Först nu trycker du tills ett klick-ljud hörs.
- Dra ut skalpellhandtaget samtidigt som du håller emot på baksidan med andra handen.
- Vik tillbaka stödet/skyddet, tryck till och avfallshanteras som stickande/skärande avfall.

Orderinformation

Artnr	Beskrivning	Förp
QSSVCAS-3Y	BladeCASSETTE med plats för tre knivblad Handtag: 3, 3L, 4, 4L, 5, 7, 9, baron, Lawton långt handtag, runda handtag Blad: 10, 10a, 11, 11P, 12, 14, 15, 15a, 15c, 16, 19, 20, 21, 22, 22a, 23, 24, 25, 25a, 27, 36, 6, 9, E11, Sabre D/15	48st