


Main-Lock 3

Fixeringsförband

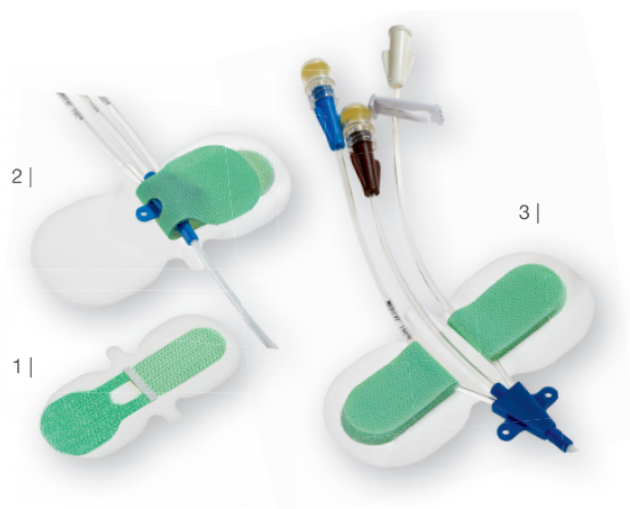

Produktinformation

ITSAOVO
Novo Klinik-Service GmbH

- Main-Lock 3 är hypoallergen, hudvänlig, och latexfritt
- Fixeringsförband med särskilt stabila kardborreband som används för festsättning av CVK katetrar och sårdränage m.m.
- Genom att använda Main-Lock 3 minskar risken för oavsiktlig extrahering av katetrar
- Rekommenderad användningstid 3 dagar
- Går utmärkt att klippa i förbandet för specialanpassning
- Förpackas osterila

Användningsområde

- CVK:er
- Artärkateter
- KAD
- PEG slangar
- Hickmankateter
- Nefrostomikatetrar
- Suprapubiskateter
- Sårdränage



Orderinformation

Artnr	Beskrivning	Bredd	Längd	Förp
90-60-81	Main-Lock 1	3,1 cm	7 cm	100st
90-60-82	Main-Lock 2	4 cm	9 cm	100st
90-60-83	Main-Lock 3	4 cm	9 cm	100st

Distributör: SYLAK AB | Ekonomivägen 5, 436 66 Askim | 031-748 49 50 | order@sylak.se | www.sylak.se
Tillverkare: Novo Klinik-Service GmbH | Zum Frenser Feld 1 | 50127 Bergheim | Tyskland | www.its-novo.de


Användarinstruktion vid hantering av CVK:er




1. Förbered huden enligt sjukhusets rutiner. Vi rekommenderar att raka bort hår för bättre fäste av Main-Lock. Ta bort skyddspapperet.



2. Öppna kardborrebanden och ta bort det lilla skyddspapperet som finns under kardborrelåset. Vänta några sekunder så att klistret får den optimala fästförmågan. Placera ex. CVK-slangarna enligt bilden.

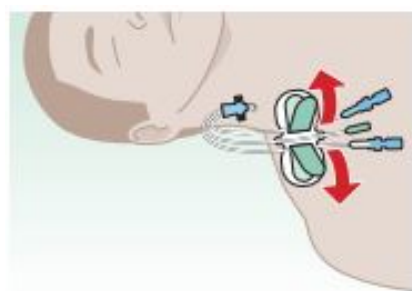

3. Vik tillbaka vingarna.

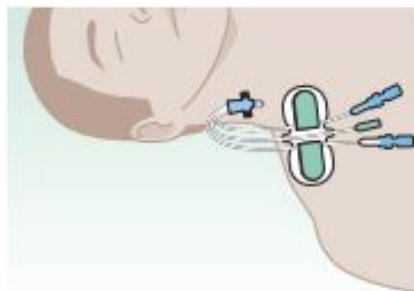

4. Optimal fixering av en CVK.